



# FlopThotics.

Cambio de tira

---

Cambiar usted mismo las tiras de sus FlopThotics es realmente fácil, **EdserLabs®** le facilita las instrucciones para que lo pueda hacer usted mismo.





# FlopThotics.


Cambio de tira

1




**Necesita:** Sus FlopThotics, la tira de recambio, tijeras, lápiz, y 3 aplicadores

2

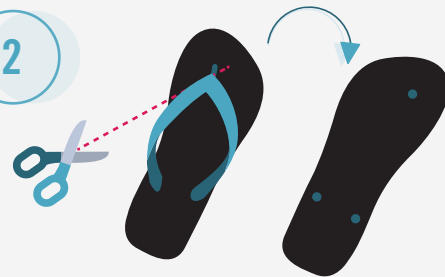

**Corta la tira por los tres extremos,** de manera que se separe de la suela como se muestra el anverso.

3

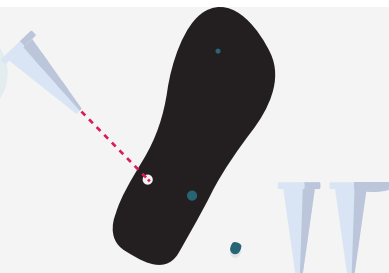

**Sustraiga el plástico** que queda con ayuda de los aplicadores presionando el plástico hacia abajo.\*

4



**Repita la misma operación** con los tres agujeros hasta que los tres sobrantes estén desprendidos.

5



**Inserte la tira de goma nueva** con ayuda de un lápiz ejerza presión hasta que pase por el agujero.

6



**Repita la operación** con los otros dos extremos y ya está listo para lucir sus FlopThotics como nuevas!

\*En caso de no disponer de aplicador, puede utilizar un lápiz o cualquier objeto de forma similar.

